



# VALISE DE SECOURS BRÛLURES

Réf. FAR 2080 PP

- Paire de gants jetables
- Dosette de sérum physiologique
- Tube de 50 ml d'eau gélifiée
- Compresse Urgotul®
- Compresse de gaze stérile
- Bandes extensibles
- Sparadrap
- Feuille "Brûlures"



## PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées



## DOSETTE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.  
Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :

En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil

Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter



## TUBE D'EAU GÉLIFIÉE

Destiné à remplacer l'eau en cas de brûlure, ce gel à base d'eau purifiée hydrate les couches supérieures de la peau. Cohésif, sa viscosité l'empêche de couler.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir le tube et ôter l'opercule en aluminium
2. Appliquer sur la zone à apaiser en massage léger jusqu'à complète absorption
3. Renouveler l'application si nécessaire



## COMPRESSE URGOTUL®

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

**Existent en 5 x 5 cm, 10 x 12 cm**

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité. Sous emballage individuel stérile, ces compresses hydro colloïdes sont indiquées pour les soins locaux des brûlures, et permettent des conditions favorables au processus de cicatrisation.

Grasses dans leur composition chimique, sans être grasses au toucher, les compresses URGOTUL n'adhèrent ni à la brûlure, ni à son pourtour.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Recouvrir Urgotul d'un pansement secondaire : compresse stérile maintenue par une bande extensible et fixée par sparadrap



## COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 40 x 40 cm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :

Pour une protection : poser la sur la partie à protéger.  
Fixer la à l'aide d'un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner



## **BANDES EXTENSIBLES**

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)


**Existent en 3 m x 5 cm, 3 m x 7 cm, 3 m x 10 cm**

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### **MODE D'EMPLOI :**

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

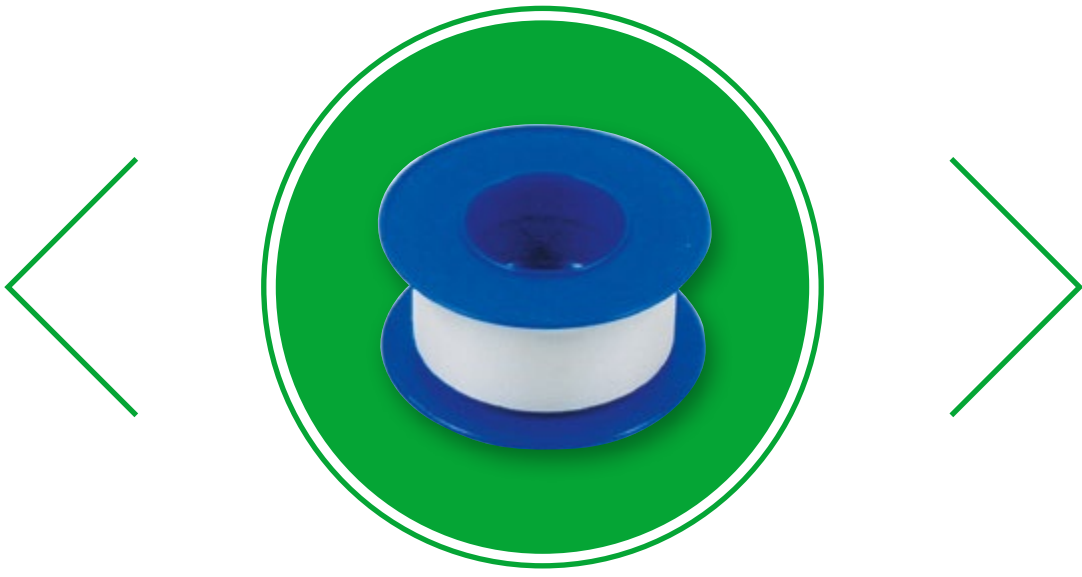

## SPARADRAP

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique de 5 m x 2 cm.

Sécable, il se découpe sans ciseaux.

### MODE D'EMPLOI :

1. Dérouler la longueur nécessaire
2. Couper la aux ciseaux, ou à la main
3. Apposer à l'endroit désiré





## FEUILLET “BRÛLURES”

Cette notice explicative schématisée, vous permettra d'utiliser chaque produit contenu dans le coffret de manière optimale.

Elle contient également tous les numéros d'urgence.